

TARTIWEB KURULUM KILAVUZU

1. www.tartiweb.com adresinde bulunan

20 DANIŞANLIK KULLANIM PAKETİ	LİMİTSİZ (YILLIK ÜYELİK) DANIŞANLIK KULLANIM PAKETİ
Ücretsiz 20 Danışanlık kullanım paketi	199.-€ + KDV Limitsiz (yıllık üyelik) Danışanlık kullanım paketi
20 Danışan	Limitsiz Danışan
Sınırsız Ölçüm	Sınırsız Ölçüm
Ön Başvuru	Ön Başvuru

paket seçimlerinden bir tanesi seçilerek " ÖN BAŞVURU" formu doldurulmaktadır.

20 Danışanlı Ön Başvuru Formu

Tartı Medikal Firmamızı ve ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder.

Tarih : 12.01.2014

KULLANDIĞINIZ ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

Kullandığınız Ürün

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

Adınız ve Soyadınız

Cep Telefonunuz

E-posta Adresiniz

Yukarıda verilen bilgiler doğru olarak kabul edilerek, uygun lisanslama Tartı Medikal tarafından yapılacaktır.

İrtibat için : TARTI MEDİKAL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. www.tarti.com
info@tarti.com 0212 3271005

Kapat

Gönder

Bu form doldurularak "Gönder" butonuna basılır ve Sistem tarafından yaratılan bu talep "Merkez" e gönderilir.

2. Merkeze gönderilen bu talep hemen değerlendirmeye alınarak , talep sahibinin vermiş olduğu bilgiler nispetinde "Uzman Kullanıcı" için sisteme tanım yapılır ve sistem yaratılan yeni Uzman Kullanıcı için otomatik şifre bildirimini, formda yer alan e-mail adresine aşağıdaki şekilde yapar.

Böylece artık sistemi yapmış olduğunuz paket seçimine göre kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uzman Kullanıcı Bilgileri

Sayın

tartiweb.com portalını kullandığınız için teşekkür ederiz. Portal vasıtası ile analiz sonuçlarınız sizin adınıza serverlarımızda saklanacaktır ve bu sonuçlara ulaşmak internet bağlantısının olduğu her ortamda sizin için mümkün olabilecektir.

Geçmiş raporları görüntüleyebilir veya paylaşım için hazır halde bulundurabilirsiniz. Bu portal kayıtlarınızın, kayıtları oluşturan uzman kullanıcı ve sizin istediğiniz kişiler tarafından görüntülenmesine imkan tanıyacaktır. Size tanınan ve portalın gelişimi ile birlikte tanınacak olan imkanlara ulaşmak için, size özel ve sizin tarafınızdan kontrol edilecek bir şifre ve tartiweb.com portalımıza hızlıca ulaşip verilerinize erişmek için kısayol linki aşağıda sunulmaktadır.

Lütfen kısayol linkini tıklayınız ve email adresiniz ile birlikte size özel sistem tarafından üretilerek gönderilmiş olan şifrenizi yazarak sisteme giriş yapınız ve şifrenizi değiştirmeyi unutmayınız!

Sisteme girişi bilgileriniz aşağıdaki gibidir:

Şifreniz: 5pyypg **Giriş**

İyi günlerde kullanmanız ve mutlu olmanız dileğiyle.

Sistem tarafından oluşturulan e-mail'dir.Cevap gerekli değildir.

TARTI *Paçat için teknolojiler*

3. www.tartiweb.com adresi üzerinden, sistemin bir parçası olan,ayrıca veri saklama ve raporlama hizmetini offline konumda iken de yapmanızı sağlayan masa üstü yazılımın bilgisayarınıza indirilmesi gerekmektedir.

Bunun için aşağıdaki işlemler yapılır.

Hemen deneyin

İndirin

www.tartiweb.com sayfasının alt bölümünde yer alan "İNDİRİN" butonu tıklanır.

İşletim Sistemleri	32 Bit	64 Bit
Windows XP	İndir (v.1.3.0.0)	İndir (v.1.3.0.0)
Windows 7	İndir (v.1.3.0.0)	İndir (v.1.3.0.0)
Windows 8	İndir (v.1.3.0.0)	İndir (v.1.3.0.0)
Windows 8.1	İndir (v.1.3.0.0)	İndir (v.1.3.0.0)

Kapat

Sistem size kullanmış olduğunuz işletim sistemini ve bilgisayarınızın özelliklerine uygun olarak indirmeniz gereken yazılımı sorar. LÜTFEN BİLGİSAYARINIZIN ÖZELLİKLERİNE UYGUN OLAN SÜRÜMÜ İNDİRİNİZ.

BİLGİSAYARINIZIN ÖZELLİKLERİNE AİT BİLGİLERE


Bilgisayarım (mouse sağ klik) + Özellikler

The screenshot shows the Windows 7 System Information window. The title bar reads "Denetim Masası > Tüm Denetim Masası Öğeleri > Sistem". The main content area displays the following information:

- Windows sürümü:** Windows 7 Professional, Telif Hakkı © 2009 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Service Pack 1. Windows 7'nin yeni sürümüyle daha fazla özelliğe sahip olun.
- Sistem:** Derecelendirme: 5.6 Windows Deneyimi Düzini. İşlemci: Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz 3.90 GHz. Yüklü bellek (RAM): 8.00 GB (kullanılabilir miktar: 7.89 GB). Sistem türü: 64 bit İşletim Sistemi. Kalem ve Dokunma: Bu Görüntü Biriminde Kalem Girdisi veya Dokunarak Giriş yok.
- Bilgisayar adı, etki alanı ve çalışma grubu ayarları:** Bilgisayar adı: Ugur-Bilgisayar. Tam bilgisayar adı: Ugur-Bilgisayar.tarti.local. Bilgisayar açıklaması: tarti.local. Etki Alanı: tarti.local.


A context menu is open over the "Bilgi" icon in the taskbar, showing options: Aç, Yönet, Virüs taraması yap, Ağ sürücüsüne bağlan..., Ağ sürücüsü bağlantısını kes..., Kısayol Oluştur, Sil, Yeniden Adlandır, Özellikler.

4. Bilgisayarınız bu komutla birlikte indirme işlemine başlayacaktır. Bu işlem bilgisayarınızın hızına ve internet bağlantınızın hızına göre 5 ila 20 dk arasında bir süre alabilir.

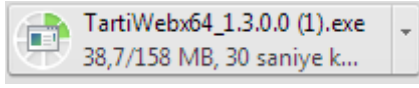


KURULUM TAMAMLANDIKTAN SONRA BİLGİSAYARINIZI TEKRAR BAŞLATINIZ.

5. Bilgisayarınızda sol alt köşede indirme işlemi görüntüleyebilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandığında lütfen mouseniz ile çift klik yaparak programı çalıştırınız.

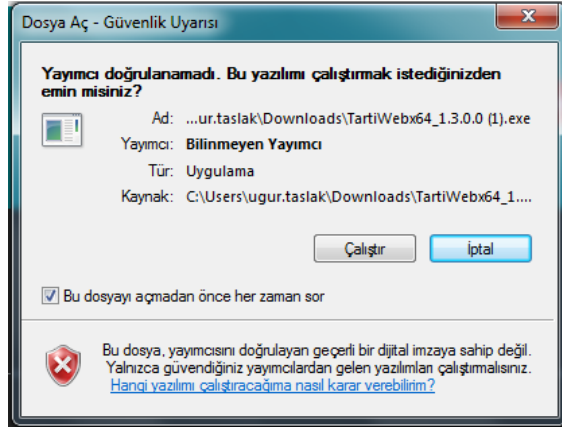


Gelen ekranda "Çalıştır" butonunu kullanınız.


6. Program yüklenip masa üstünüzde yaratılan program simgesini mousenizin sağ butonuna basarak yalnızca 1 kez "Yönetici Olarak Çalıştır" işlemi ile çalıştırınız.

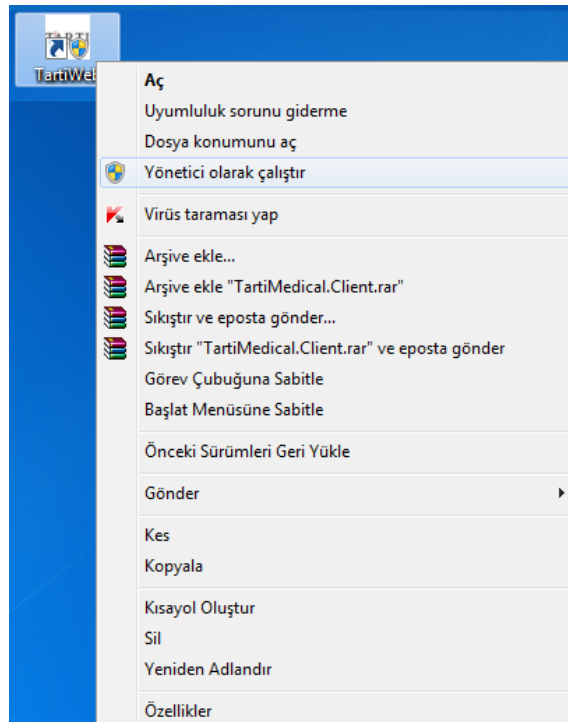

7. Programınız çalışacak ve aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır. Lütfen size gönderilmiş olan e-mail konfirmasyonunu ve şifrenizi giriniz.

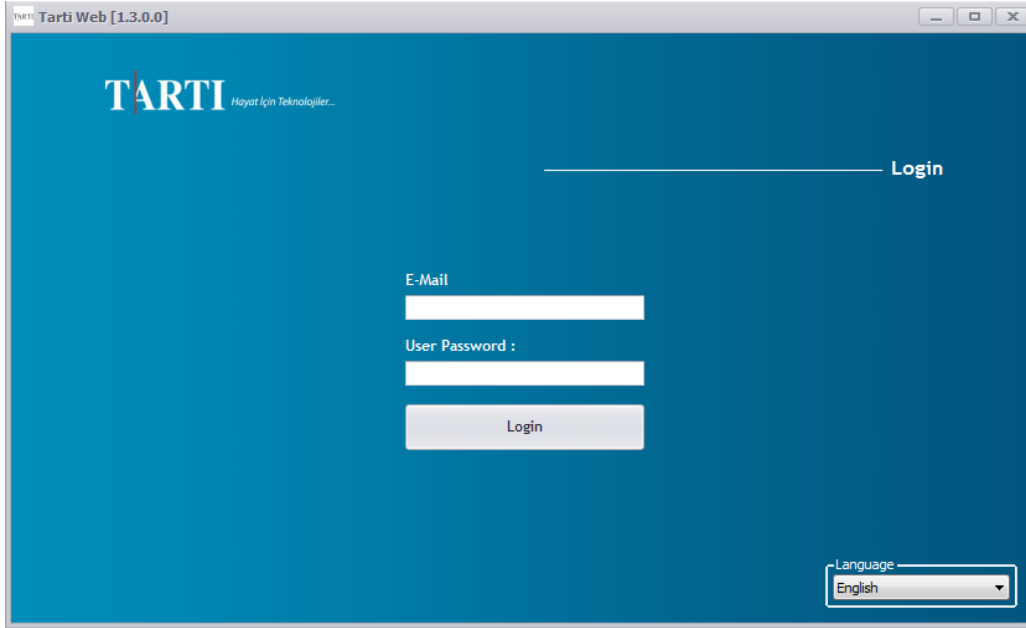

8. Aşağıdaki şekilde sizi karşılayacak olan programa ait Ana Sayfa sizi yapmak istediğiniz işlemler için yönlendirecektir.

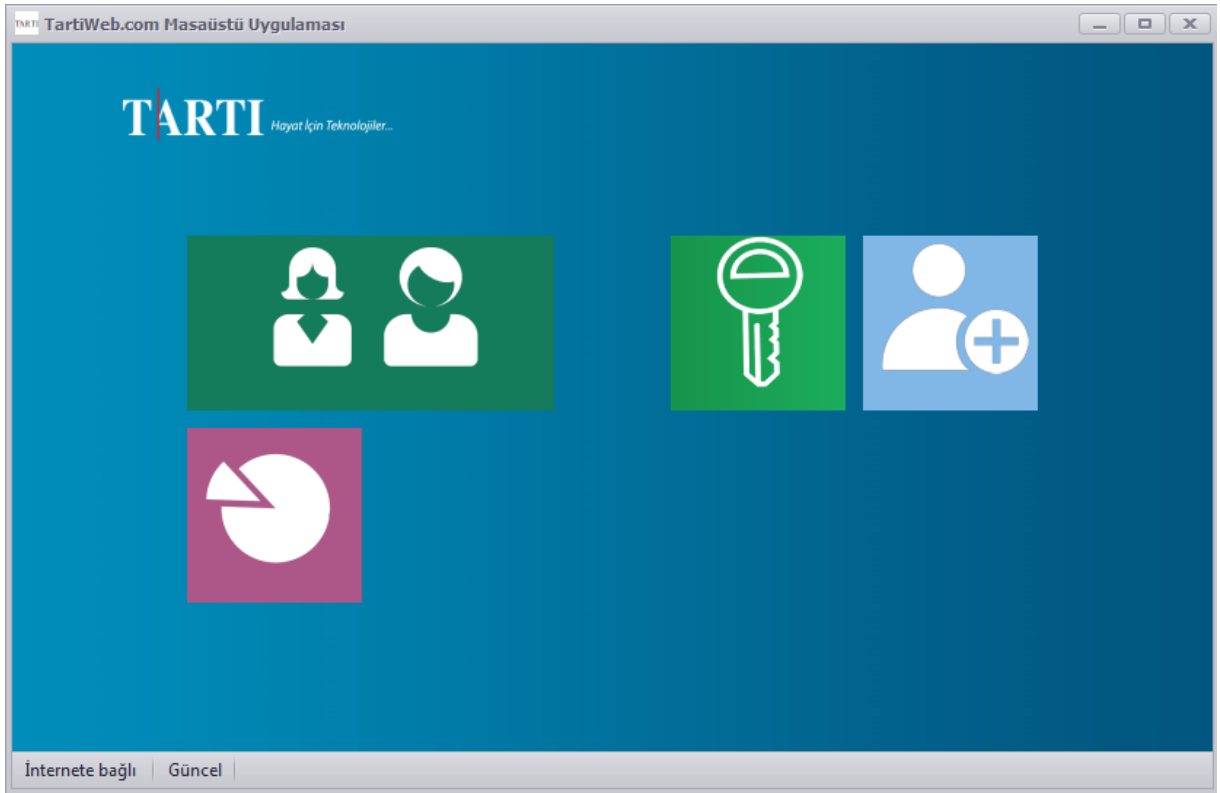

9.İşlemler;

Yeni bir Danışan kaydı aşağıdaki buton vasıtası ile yaratılabilir,



Buton tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenecektir.

Lütfen bilgileri eksiksiz doldurunuz.

Danışanınıza ait e-mail adresi doğru olmalıdır, aksi takdirde sistem tarafından yaratılan herhangi bir bildirim kendilerine ulaşmayacak ve internet üzerinden görüntülemeler sağlanamayacaktır.

TARTI TARTIWeb.com Masaüstü Uygulaması

TARTI Hayat İçin Teknolojiler...

Yeni Üye Kaydı Oluşturulması

E-posta Adresi :

Ad :

Soyad :

Doğum Tarihi : 01 Aralık 2014 Pazartesi ▼

Telefon :

T.C. Kimlik No :

Cinsiyet : Erkek

Vücut Tipi : Standart

Boy : cm

www.tartiweb.com portalı üzerinde danışanınız için bir hesap açılınsın mı? Evet

İnternete bağlı | Güncel

Doğru olarak tarafınızdan doldurulan bilgiler, sağlıklı Analiz almanızı sağlar.

En altta yer alan butonda seçili olan "EVET" Danışanınızın e-mail adresine otomatik olarak üretilen bir şifrenin gitmesini ve internet üzerinden bu şifre ile kendine ait verileri görüntüleyebilmesini sağlar.

DANIŞANINIZA BU HİZMETİ VERMEK İSTEMİYOR İSEİNİZ,LÜTFEN BUTONU "HAYIR" YAPINIZ.

Üyelerin Görüntülenmesi, Danışmanlığını yaptığınız ve Uzman Kullanıcı tarafından yaratılan Üyeleri görüntüleme sayfasıdır



BU SAYFA ÜZERİNDEN ANALİZ İŞLEMİNİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

Analiz işlemi Üye Seçimi yapıldıktan sonra, aşağıdaki ekranda görülebileceği gibi "CİHAZ SEÇİMİ" yapılarak gerçekleştirilebilir.

TARTI TartıWeb.com Masaüstü Uygulaması

← TARTI Hayat İçin Teknolojiler...

Üye İşlemleri

Yeni Üye

Raporlar

Analiz İşlemi

Danışan Melis Karakaya

Vücut Tipi : Standart

Yaş : 21 Boy : 165

Dara 1 kg


Cihaz Cihaz Adı Seçiniz

Filtrelemek istediğiniz başlığı buraya sürükleyiniz veya CTRL + F tuşlarını kullanınız!

Sıra	Ad	Soyad	Tarih	E-Posta
432				
431				
430				
429				
428				
427				
426				
425				
424				
423				
422				
421				
420				
419				
418				

İnternete bağlı Güncel


Tüm üyelerinize ait yapmış olduğunuz Analizleri aşağıdaki butona basarak görüntüleyip raporlayabilirsiniz.

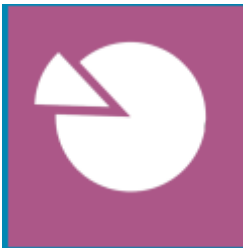


Lisans durumunuzun ve Son Kullanıcı Sözleşmenizin yer aldığı görüntüleme butonu aşağıdadır.



10. Tartı Web Masaüstü uygulama ile yapmış olduğunuz ölçümleri tartiweb.com üzerinden ulaşacağınız "Uzman Girişi" ile internet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

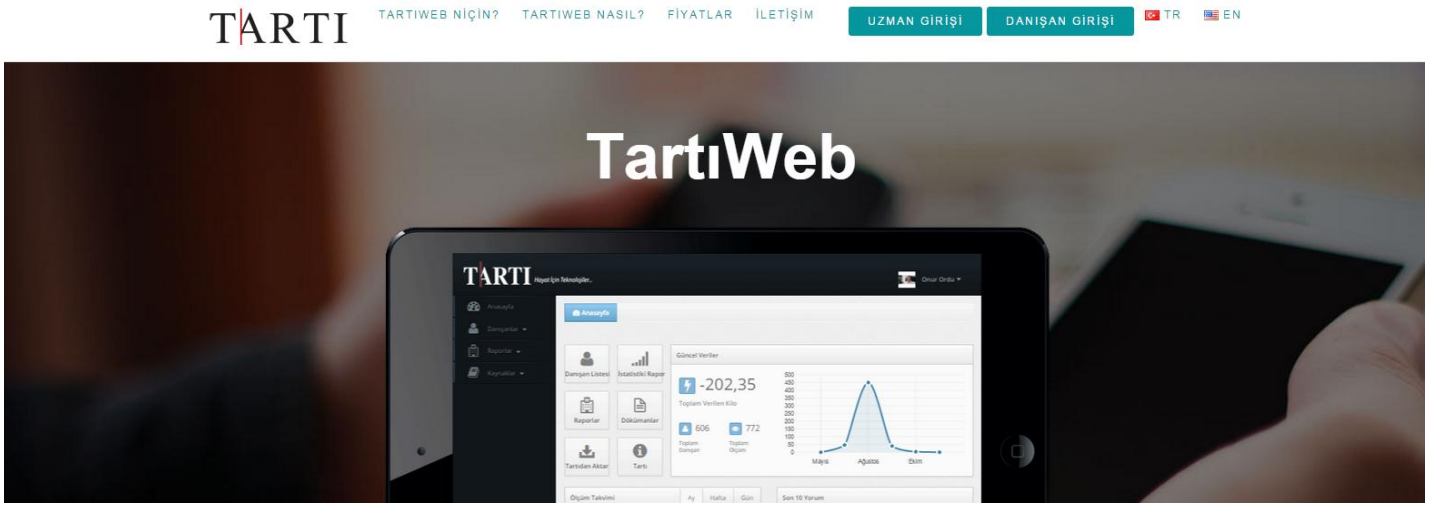


11. Uzman girişini işlemleri gerçekleştiren uzmanlar ve Danışan girişini ise işlemi gerçekleştiren uzmanların Danışanları "Analiz Verilerine" ulaşmak için kullanmaktadır.

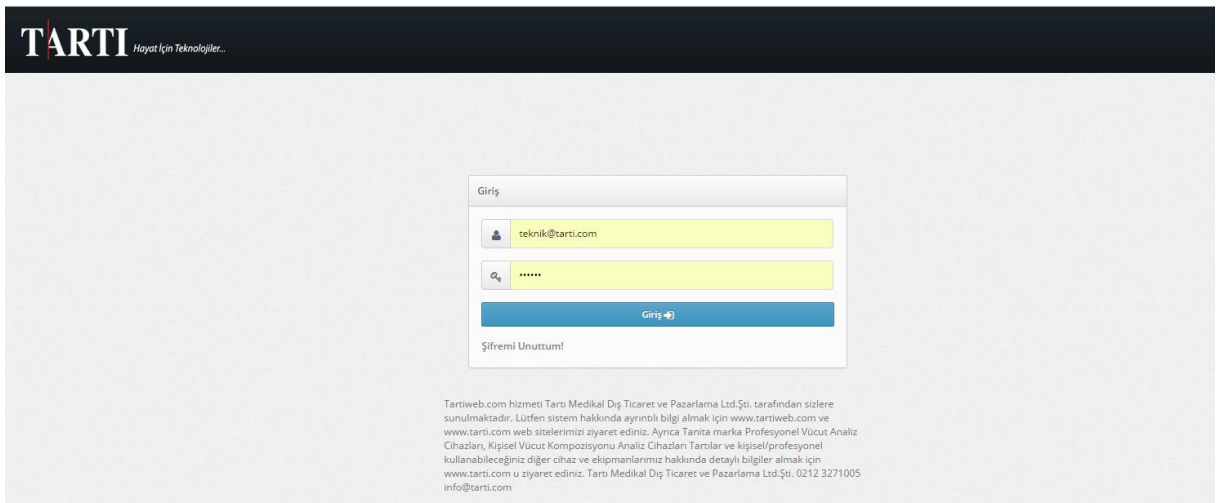

Uzman butonu tıklandığında yukarıdaki gibi bir sayfa açılacak olup, bu sayfaya erişim kayıtlı olan e-mail adresiniz ve şifreniz ile yapılabilmektedir.

12. Sayfaya giriş yaptıktan sonra Menü de yer alan butonlar verilerinize erişim konusunda sizi yönlendirecektir.

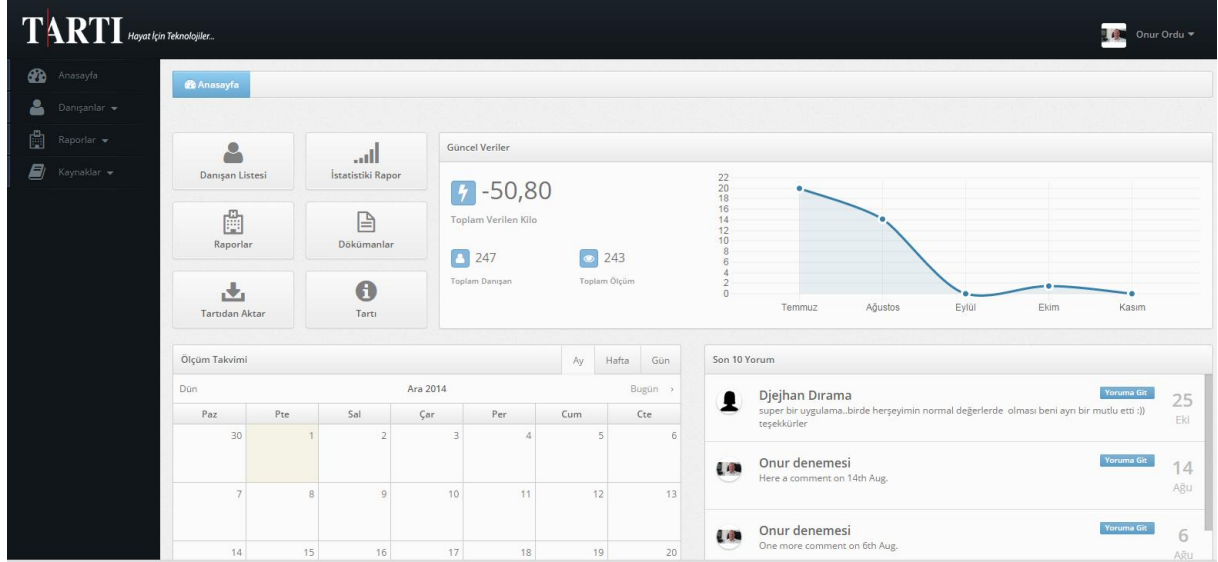

DANIŞANLARIN GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ

Tartı Web Masaüstü uygulama ile yapılmış olan Danışana ait ölçümler Danışan tarafından tartiweb.com üzerinden ulaşacağı "Danışan Girişi" ile internet üzerinden görüntüleyebilirler. Uzmanın yetkilendirdiği Danışanlar için sistem ilgili e-mail hesabına şifre bildirimini yapar ve Danışan da kendi ölçümlerini böylece internet üzerinden görüntüleyebilir.

TARTI

TARTIWEB NİÇİN?

TARTIWEB NASIL?

FİYATLAR

İLETİŞİM


UZMAN GİRİŞİ

DANIŞAN GİRİŞİ

TR

EN

TartıWeb

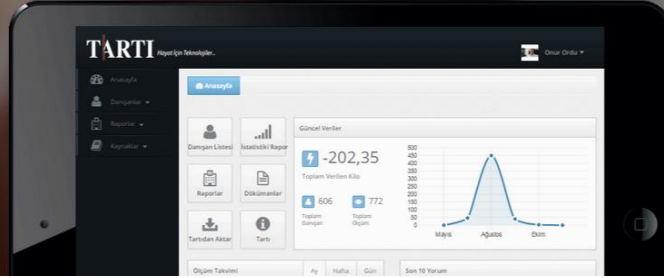

TARTI

Hayat İçin Teknolojiler...

Giriş

Email

Parola

Giriş

Şifremi Unuttum!

Tartiweb.com hizmeti Tartı Medikal Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd.Şti. tarafından sizlere sunulmaktadır. Lütfen sistem hakkında ayrıntılı bilgi almak için www.tartiweb.com ve www.tarti.com web sitelerimizi ziyaret ediniz. Ayrıca Tanita marka Profesyonel Vücut Analiz Cihazları, Kişisel Vücut Kompozisyonu Analiz Cihazları Tartılar ve kişisel/profesyonel kullanabileceğiniz diğer cihaz ve ekipmanlarımız hakkında detaylı bilgiler almak için www.tarti.com u ziyaret ediniz. Tartı Medikal Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd.Şti. 0212 3271005

İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZ DİLEĞİ İLE.

TARTI MEDİKAL DIŞ TİC VE PAZ LTD.ŞT. www.tarti.com beşiktaş istanbul -0212 3271005